

**2022年1月7日(第3版)

*2020年12月17日(第2版)

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド 11661000
METRAS アイパッチ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状



原材料：綿、アルミニウム、プラスチック

原理

眼瞼を覆うように貼付し、外部の刺激から目を保護する。

【使用目的又は効果】

目の保護に用いることを目的とした、ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドからなる器具である。

【使用方法等】

1. 本品をシートより剥がし、フィンの付いた部分が鼻頭にくるようにし、眼瞼の中心に貼付する。
2. 目の下の治療等を行う場合は、本品を剥がさず、めくるようにして行う。

*** 【使用上の注意】**

- ・ 本品の貼付箇所に湿疹等の疾患がある患者は、使用前に医師に相談すること。
- ・ 粘着面保護フィルムを剥離後は、直ちに使用すること。
- ・ 使用前に粘着面を触らないこと。
- ・ 本品の使用により発疹、発赤、かぶれ等の症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、医師の診断を仰ぐこと。
- ・ レーザー治療時には、本品に直接照射しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

- ・ 被包に記載。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造業者

エルマ販売株式会社 吉川事業所

製造販売業者

メトラス株式会社

TEL: 03-6256-0181 Fax: 03-6256-0183